



# NORUCO

HAVE A LOOK INSIDE

## MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES TIPO IIR

REF: NR-MASKQRIIR



FABRICANTE PRODUCTO: NORUCO S.L.

DIRECCIÓN: Av/ de la Industria 53-55 ,41007  
Sevilla  
ESPAÑA

### DESCRIPCIÓN

Mascarilla facial médica - Tipo IIR según normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2019.

Las mascarillas faciales quirúrgicas evitan que las partículas de gran tamaño expelidas por el usuario entren en contacto con el paciente o el entorno de trabajo. Las mascarillas de Tipo IIR cuentan con una eficacia de filtración bacteriana de más de 98 % y son resistentes a fluidos y salpicaduras. Tienen 5 años de caducidad.

### CARACTERÍSTICAS

- Sujeción por banda elástica de algodón suave de gran comodidad
- Tres capas protectoras
- Cinta adaptable al tabique nasal

### USO RECOMENDADO

Protección del personal sanitario y los pacientes de enfermedades infecciosas.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- BFE  $\geq$  98%
- Presión de resistencia a las salpicaduras  $\geq$  16 kPa
- Respirabilidad: Presión diferencial  $<$  60 Pa/cm<sup>2</sup>
- Medidas: 175 x 95mm
- Almacenar en lugar seco a temperaturas entre 10° y 30°


- No estéril
- 100% Polipropileno
- Libre de fibra de vidrio
- Hipoalergénico
- Libre de látex

CAJA: 50 UNDS



Información de fecha de fabricación y lote en el lateral de la caja

### MÉTODO DE USO

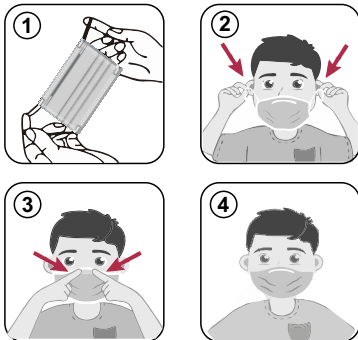


1. Extender con las manos la mascarilla para hacerla más ancha.

2. Colocar la mascarilla sobre la cara, empleando los elásticos sobre las orejas.

3. Presionar el clip de la parte superior sobre la nariz hasta obtener un ajuste perfecto sobre ella ajustando la mascarilla en general hasta obtener un buen ajuste y protección.

4. El ajuste debe abarcar la boca y nariz en su totalidad.

CARA EXTERNA

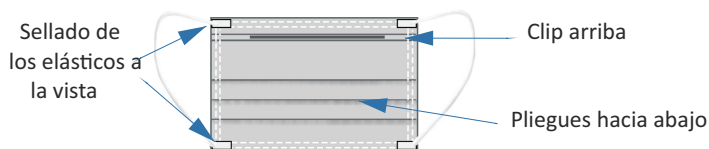

CARA INTERNA

